



輝く未来の一步のために



もっと遊ぼう!

好奇心旺盛な子どもたちは、楽しい遊びを見つけると汗だくになるまで夢中になったり、全身どろだらけになってもおかまいなしに、たくさんを経験しながら成長していきます。

リオネットのSPLASH(スプラッシュ)は、子どもたちがたくさん汗をかいて遊ぶときでもお使いいただける補聴器です。



もっと学ぼう!

高度・重度難聴はもちろん、軽度・中等度難聴にも対応するとともに、コンパクトサイズを実現しました。

さらに、多彩なデジタル機能を搭載し、子どもたちのコミュニケーションや学習に大切な聞こえをサポートします。



防水・パワー・デザイン・高機能デジタル。すべてはこのコンパクトな補聴器に詰まっています。



耳かけ型(RITE)*
*RITE: Receiver in the ear

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞



パッションレッド
×
グレー



ローズピンク
×
グレー



フォレストグリーン
×
シャドーブラック



お気に入りの
カラーを
選んでね

マリンブルー
×
グレー

選んで楽しい、
個性ゆたかなカラーバリエーション

全 27
パターン



- マイクカバー 9色
- ナチュラルホワイト
 - クールグレー
 - ベージュ
 - チョコレート
 - シャドーブラック
 - フォレストグリーン
 - パッションレッド
 - ローズピンク
 - マリンブルー
 - シャドーブラック
- ケース 3色
- グレー
 - シャドーブラック
 - ベージュ

汗や水に強い、パワータイプの

SPLASH

スプラッシュ

RIONETMAJES

リオネットマジェスシリーズ

耳かけ型 (RITE)
HB-W1M
HB-W1TA
HB-W1RA

RIONETPRECIA

リオネットプレシアシリーズ

耳かけ型 (RITE)
HB-W1CF
HB-W1YF

RIONETCLASSE

リオネットクラッセ

耳かけ型 (RITE)
HB-W1CL

軽度から重度難聴までカバー

高度・重度難聴のお子様には

EXパワーイヤホン

中等度 高度 重度

(50 ~ 100dBHL)



(オーダーイヤチップ)

軽度・中等度・高度難聴のお子様には

ミディアムイヤホン

軽度 中等度 高度

(25 ~ 85dBHL)



(オーダーイヤチップ)

活発なお子様に。
耳にやさしい
ワイヤーカバーが
付属しています。



しかも、こんなにコンパクト



ハイパワーシリーズII
ハイパワーシリーズ

スプラッシュ

約36mm

約46mm



元気に
水遊び



屋外で
スポーツ



自然と
触れあふ

もっと遊べる。 もっと学べる。



のびのび
学ぶ

防水・防じん性能は
補聴器で世界初*となる
多用途形の保護等級IP65/IP68に適合し、
さまざまな場面での補聴器装着が可能です。

補聴器で
世界初*
多用途形の
保護等級

防水・防じん
保護等級
IP65/IP68
(多用途形)

*当社調べ(2014年6月現在)



シャワーや
お風呂

IPとは、JIS C 0920:2003、IEC 60529:2001が定める、防水・防じんについての保護等級です。
●防じん保護等級 [6]: 補聴器内部を減圧状態にして、細かい粉じん(0.075mm)が浮遊する空間に2時間入れても粉じんが内部に侵入しない。
●防水保護等級 [5]: あらゆる方向からの噴流によっても有害な影響を受けない。
●防水保護等級 [8]: 水深1.5mに30分水没させても有害な影響を受けない。(当社条件)

●本製品は完全防水ではありません。●本製品は使用環境に制約などがあります。また、所定の方法による使用後のお手入れが必要です。



スマートフォンで、スプラッシュ特設サイトをご覧ください。

しっかり届けたい!



教室のようにさまざまな音や声が
次々に生まれる場所では、
大事な先生の声や同級生の発言は
聞こえにくくなってしまいがちです。



リオネットには、まわりの音に影響されずに
音を直接補聴器に届ける
システムがあります。

FM補聴システム

対応機種

(グレーのものは非対応)

リオネットマジエス
シリーズ

リオネットプレシア
シリーズ

リオネットクラスセ

ハイパワーシリーズII
ハイパワーシリーズ

リオネットマジエス シリーズ

リオネットマジエスシリーズに対応した
プレミアムリモコンII (RH-03) にFM
受信機を取り付け、FM電波を介して
話し手の声を補聴器でよりクリアに聞
くことができます。



ハイパワーシリーズII ハイパワーシリーズ

補聴器に装着した接続シュー
にFM受信機を取り付け、FM
電波を受信します。



※ハイパワーシリーズII・ハイパワーシ
リーズの主な機能についてはP.13を
ご覧ください。



誘導コイル(Tコイル)

対応機種

リオネットマジエス
シリーズ

リオネットプレシア
シリーズ

リオネットクラスセ

ハイパワーシリーズII
ハイパワーシリーズ

誘導コイル(Tコイル)からの音を聞くことができます。また、設定によって誘導コイル(Tコイル)とマイクの音がミキシングされ、同時に聞くことができます。

●防水性能を有するのは、SPLASH(スプラッシュ)補聴器本体のみです。●FM補聴システムについてのご相談は販売店までお問い合わせください。

もっと楽しく！



リオネットには、
さまざまな機器と接続し
補聴器で音を
楽しむことができる
機能があります。

対応機種 (グレーのものは非対応)

リオネットマジエスシリーズ	リオネットプレシアシリーズ	リオネットクラッセ	ハイパワーシリーズII ハイパワーシリーズ
---------------	---------------	-----------	--------------------------

オプションのプレミアムリモコンII (RH-03) を使用して、携帯電話やスマートフォンでの通話を楽しんだり、テレビアダプターと一緒に使ってテレビの音を補聴器で楽しむことができます。




※ および Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標であり、リオン株式会社はライセンスを受けて使用しております。

外部入力機能

対応機種 (グレーのものは非対応)

リオネットマジエスシリーズ	リオネットプレシアシリーズ	リオネットクラッセ	ハイパワーシリーズII ハイパワーシリーズ
---------------	---------------	-----------	--------------------------

外部機器と接続して、補聴器で直接聞くことができます。

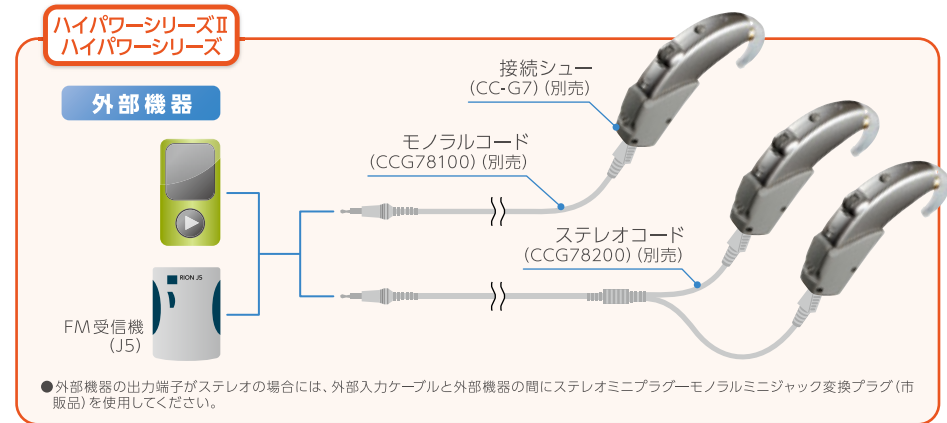

Bluetooth対応

イヤホンクロス

対応機種 (グレーのものは非対応)

リオネットマジエスシリーズ	リオネットプレシアシリーズ	リオネットクラッセ	ハイパワーシリーズII ハイパワーシリーズ
---------------	---------------	-----------	--------------------------


装用例 (ハウリング防止のため、補聴器とイヤホンを離す)

補聴器を耳にかけられない場合 (主に乳幼児) 補聴器を耳にかけられる場合 (幼児～成人)



●当社では補聴器固定用のアクセサリーをご用意しておりません。補聴器を固定する際は、補聴器が入る袋などを別途ご用意いただき、安全ピンやマジックテープで衣服などに留めてください。

乳幼児のように耳かけ型補聴器を安定して耳にかけておけない場合や、ハウリングでお困りの場合などに便利です。

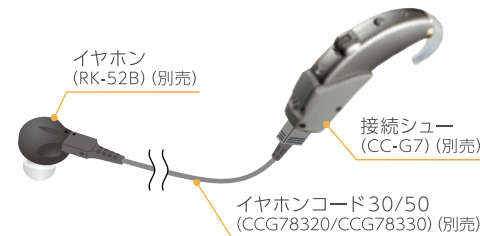

●防水性能を有するのは、SPLASH (スプラッシュ) 補聴器本体のみです。●Bluetooth対応、外部入力機能、イヤホンクロスについてのご相談は販売店までお問い合わせください。●イヤホンクロスへの変更は当社工場での作業となります。仕様変更費用は別途申し受けます。●イヤホンクロス仕様に変更すると、外部入力機能はご使用になれません。

聞こえやニーズに合わせて選べるラインアップ



耳かけ型 (RITE*)

GOOD DESIGN AWARD
2014年度受賞



EXパワーイヤホン
中等度 高度 重度
ミディアムイヤホン
軽度 中等度 高度

* RITE: Receiver in the ear

★の数、スプラッシュとハイパワーシリーズⅡ・ハイパワーシリーズの中での機能の高さを相対的に比較して表しています。

ハイパワーシリーズⅡ・ハイパワーシリーズ

耳かけ型 中等度 高度 重度

7色のカラーバリエーション



ピンク サファイア プラチナ シルバー シャンパン ゴールド シルキー ベージュ コーヒー ブラウン プレミアム ブラック

主な機能一覧		SPLASH (スプラッシュ)			
		リオネットマジェス HB-W1M	リオネットマジェスC HB-W1TA	リオネットマジェスV HB-W1RA	リオネットプレシア HB-W1CF
希望小売価格	片耳 (1台)	340,000円	290,000円	240,000円	218,000円
	両耳 (2台)	578,000円 (1台あたり289,000円)	493,000円 (1台あたり246,500円)	408,000円 (1台あたり204,000円)	370,600円 (1台あたり185,300円)
防水性能		★★★	★★★	★★★	★★★
聴力に合わせて細かく調整できる		16バンド4チャンネル	12バンド4チャンネル	8バンド3チャンネル	10バンド4チャンネル
ピーピー音を抑える		★★★	★★★	★★	★★
周囲の騒音を低減		★★★	★★★	★★★	★★
正面の音を聞きとりやすくする		★★★	★★★	★★★	★★★
どの方向からの音声でも聞きとりやすくする		★★★	★★★	—	—
正面からの音を強調してより聞きとりやすくする		★★★	—	—	—
突発的な衝撃音を抑える		★★★	★★★	★★★	★★★
風雑音を低減		★★★	★★★	★★★	—
音環境の変化に自動対応		★★★	★★★	★★★	—
より広がりのある音にする		★★★	★★	—	—
音のメリハリを調整する		—	—	—	★★★
使用環境の記録・分析・反映		★★★	★★★	★★	★★
テレビ・携帯電話・スマートフォンの音がはつきり		★★★*1	★★★*1	★★★*1	—
FM補聴システム対応/外部入力機能		★★*1	★★*1	★★*1	—
双方向通信*3		★★★	★★★	—	—

		ハイパワーシリーズⅡ			ハイパワーシリーズ			
		リオネットプレシアV HB-W1YF	リオネットクラッセ HB-W1CL	適応型指向性 HB-G7PC	適応型指向性 HB-G7PS	適応型指向性 HB-G7PL	自動型指向性 HB-G7PA	固定型指向性 HB-G7PB
		178,000円	138,000円	198,000円	158,000円	118,000円	198,000円	118,000円
		320,400円 (1台あたり160,200円)	248,400円 (1台あたり124,200円)	356,400円 (1台あたり178,200円)	284,400円 (1台あたり142,200円)	212,400円 (1台あたり106,200円)	356,400円 (1台あたり178,200円)	212,400円 (1台あたり106,200円)
		★★★	★★★	—	—	—	—	—
		6バンド4チャンネル	4バンド2チャンネル	10バンド4チャンネル	8バンド4チャンネル	6バンド2チャンネル	10バンド4チャンネル	7バンド4チャンネル
		★★	★★	★★	★★	★★	★	★
		★★	★★	★★	★★	★★	★★	★
		★★	★	★★★	★★★	★★	★★	★
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—	—
		★★	—	★★★	★★	—	—	—
		—	—	★★	★★	—	★★	—
		—	—	—	—	—	—	—
		—	—	★★★*2	★★★*2	★★★*2	★★★*2	★★★*2
		—	—	—	—	—	—	—

*1 プレミアムリモンII (RH-03) が必要です。 *2 接続シュー (CC-G7) が必要です。 *3 左右とも同じ機種である必要があります。
● オーダーイヤチップは価格に含まれています。
● 補聴器は非課税です。 ● 希望小売価格はあくまでも参考価格であり販売価格は小売業者により自主的に定められるものです。



「こども・学生割引」の購入制度をご用意しています。
詳しくは販売店までご相談ください。

どなたにも使いやすく！



リオネット補聴器には、お子様からシニアの方まで、どなたにも快適に使っていただけるような工夫が詰め込まれています。

「おまかせ回路」搭載で

電池の交換が簡単

電池のプラス・マイナスをどちら向きに入れても補聴器は正しく作動します。



スマートフォンで動画をご覧ください。

www.rionet.jp/movie/omakase/

水や汗への対策

防水型補聴器を生み出した技術を応用・利用した特殊なコーティングによる“耐汗コート”や、ケースの合わせ目や内部に特殊処理を施した“耐汗処理”を採用しています。



ハイパワーシリーズII



ハイパワーシリーズ



ハイパワーシリーズ

リオネットならではの充実した保証制度

● 無料修理

リオネットマジェスシリーズはお買い上げの日より3年以内、リオネットプレシアシリーズ、リオネットクラッセ、ハイパワーシリーズⅡ・ハイパワーシリーズは2年以内に自然故障が生じた場合、無料で修理いたします(ただし、スプラッシュの防水性能保証は1年)。

● 120日以内の無料再製作 (オーダーイヤチップ)

お買い上げの日より120日以内に、オーダーイヤチップの形・大きさが耳に合わない場合、無料で何度でも再製作いたします。

● 防水点検プログラム(スプラッシュのみ)

お買い上げ時の防水性能保証の終了後も、リオネットマジェスシリーズはお買い上げから3年間で2回まで、リオネットプレシアシリーズ、リオネットクラッセはお買い上げから2年間で1回の「防水点検」を無料で受けられるサービスです。「防水点検」の防水性能保証期間は最大で1年間です。詳しい内容は販売店までお問い合わせください。

● 火災、盗難などにあったときの事故保険

補聴器がお買い上げの翌日より1年以内に破損、盗難、火災にあった場合、無料修理または同等機種による代替品提供(修理不能の場合)をさせていただきます。

【リオネットブランドビジョン】

リオネットは、「聴こえ」の喜びと感動をお客様とわかちあい、自信と輝きにあふれた毎日を約束するブランドです。

お客様ひとりひとりと信頼の絆を結び、専門的な技術と知識で、最適な“音”の世界を目指します。

そのために私たちは、販売ネットワークの充実、たゆまぬイノベーションと独自性のある製品開発、フィッティングの向上を進め、お客様の満足を常に高めていきます。



仕様	リオネットマジエスシリーズ		リオネットプレシアシリーズ		リオネットクラッセ		ハイパワーシリーズII	ハイパワーシリーズ		
	HB-W1M/HB-W1TA/HB-W1RA		HB-W1CF/HB-W1YF		HB-W1CL		HB-G7PC/HB-G7PS/HB-G7PL	HB-G7PA	HB-G7PB	
	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン	EXパワーイヤホン	ミディアムイヤホン				
規準周波数	1600Hz									
最大音響利得	75dB±5dB	50dB±5dB	75dB±5dB	50dB±5dB	75dB±5dB	50dB±5dB	79dB±5dB	77dB±5dB	74dB±5dB	
90dB	ピーク値	142dB以下	132dB以下	142dB以下	132dB以下	142dB以下	132dB以下	148dB以下	150dB以下	148dB以下
最大出力音圧レベル	1600Hz	136dB±5dB	123dB±5dB	136dB±5dB	123dB±5dB	136dB±5dB	123dB±5dB	140dB±5dB	139dB±5dB	137dB±5dB
	500Hz	129dB	119dB	128dB	118dB	128dB	118dB	135dB	135dB	133dB
誘導コイル入力の最大感度		109dB±6dB	84dB±6dB	109dB±6dB	84dB±6dB	109dB±6dB	84dB±6dB	113dB±6dB	111dB±6dB	108dB±6dB
使用電池		PR48		PR48		PR48		PR44またはPR44 [※]		PR44P

●測定値は JIS C 5512:2000(密閉形擬耳)による

電池寿命と適応難聴

電池寿命 (使用条件により異なります)	約310時間	約330時間	約330時間	約350時間	約330時間	約350時間	PR44P約375時間 PR44 [※] 約500時間	約345時間
適応難聴	中等度・高度・重度 (50~100dBHL)	軽度・中等度・高度 (25~85dBHL)	中等度・高度・重度 (50~100dBHL)	軽度・中等度・高度 (25~85dBHL)	中等度・高度・重度 (50~100dBHL)	軽度・中等度・高度 (25~85dBHL)	中等度・高度・重度 (60~120dBHL)	中等度・高度・重度 (60~120dBHL)
	伝音難聴・感音難聴・混合性難聴							

※補聴器内部の設定条件によっては、PR44もご使用いただけます。詳しくは販売店までお問い合わせください。

注意

●きこえが気になったら、まずは耳鼻咽喉科での診察をお勧めします。 ●補聴器の使用をご希望の場合は、あらかじめ耳鼻咽喉科専門医の診察をお勧めします。 ●補聴器をご使用前には添付文書及び取扱説明書を必ずご参照ください。 ●大きな音で聴かないでください。耳を傷めることがあります。 ●補聴器は使用開始前に個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティング(調整)することが必要です。 ●補聴器は適切なフィッティング(調整)によりその効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。 ●耳を治療中の方は耳鼻咽喉科専門医にご相談の上お使いください。 ●他人に補聴器を貸したり、または補聴器を借りて使わないでください。他の人があなたの補聴器を使っても耳に合わず、耳を傷める恐れがあります。



リオネット株式会社 ● <http://www.rion.co.jp/>

本社・営業部	東京都国分寺市東元町3-20-41	☎185-8533	☎042-359-7880	☎042-359-7441
東京営業所	東京都文京区本郷2-27-8(太陽館ビル)	☎113-0033	☎03-3818-4133	☎03-3818-4140
仙台営業所	仙台市太白区南大野田25-13	☎982-0015	☎022-249-5533	☎022-249-5535
西日本営業所	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル)	☎530-0001	☎06-6363-4133	☎06-4797-0111
国分寺補聴相談室	東京都国分寺市東元町3-20-41	☎185-8533	☎042-359-7833	☎042-359-7440
新宿補聴相談室	東京都渋谷区代々木2-7-7(南新宿277ビル)	☎151-0053	☎03-3379-9333	☎03-3379-2564
大阪補聴相談室	大阪市北区梅田2-5-5(横山ビル)	☎530-0001	☎06-4797-0033	☎06-4797-0111
関東リオン(株)	さいたま市浦和区仲町3-11-2	☎330-0062	☎048-824-1205	☎048-824-8885
東海リオン(株)	名古屋市中区新栄町2-9(スカイオアシス栄ビル)	☎460-0004	☎052-954-1733	☎052-954-1734
九州リオン(株)	福岡市博多区冷泉町5-18	☎812-0039	☎092-281-5361	☎092-291-2847

リオネット補聴器のご相談・ご用命は……

UD FONT

ユニバーサルデザイン(UD)の考え方に基づき、より多くの人へ適切に情報を伝えられるよう配慮した見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



この製品は当社基準の有害化学物質を含有していない環境にやさしい製品です。

販売名:補聴器HB-W1M	医療機器認証番号:225AABZX00109A01	販売名:補聴器HB-G7PC	医療機器認証番号:226AABZX00173000
販売名:補聴器HB-W1TA	医療機器認証番号:225AABZX00109A02	販売名:補聴器HB-G7PS	医療機器認証番号:226AABZX00173A02
販売名:補聴器HB-W1RA	医療機器認証番号:225AABZX00109000	販売名:補聴器HB-G7PL	医療機器認証番号:226AABZX00173A01
販売名:補聴器HB-W1CF	医療機器認証番号:225AABZX00110A02	販売名:補聴器HB-G7PA	医療機器認証番号:221AABZX00101000
販売名:補聴器HB-W1YF	医療機器認証番号:225AABZX00110000	販売名:補聴器HB-G7PB	医療機器認証番号:221AABZX00102000
販売名:補聴器HB-W1CL	医療機器認証番号:225AABZX00110A01		

※このカタログ掲載の各商品のデザイン・仕様等は予告なく変更する場合があります。
 ※このカタログ掲載の各商品の色は印刷のため、実物の色と若干異なる場合があります。
 ※本紙は、環境に配慮した揮発性有機化合物を含まない「NON-VOCインキ」を使用しています。